

INFORMATION


Der Aerosolnebel wird über die existierende Behandlungseinheit (Zentralabsaugung oder Einzelplatzabsaugung) abgeführt. Es ist keine separate Absaugung notwendig.

Die hygienische Aufbereitung der Absaugschläuche und Absauganlage wird wie gewohnt nach der Bedienungsanleitung der entsprechenden Behandlungseinheit durchgeführt.




1 Absaugkanüle mit Kanülenadapter verbinden

- 1.1 Rechten oder linken Kanülenadapter wählen.
Stecken Sie die Absaugkanüle auf den Kanülenadapter auf (auf richtigen Sitz achten!).

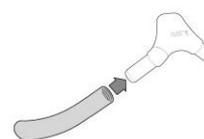

2 Kanülenadapter mit Absaugschlauch verbinden

- 2.1 Verbinden Sie den Kanülenadapter mit dem **bestehenden Absaugschlauch** (Spraynebel) des Helferin-Elements (Steckverbindung, auf richtigen Sitz achten!).

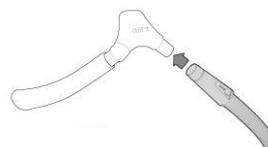


3 Kopfhörer aufsetzen

- 3.1 Bei Bedarf Bluetooth oder Noise-Cancelling aktivieren.
Stülpen Sie die Schutzhüllen über die beiden Kopfhörer-Lautsprecher.



- 3.2 Fixieren Sie das Stirnband für einen sicheren Halt.

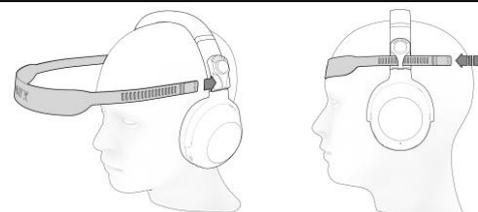

- 3.3 Setzen Sie den Kopfhörer auf den Patientenkopf (auf richtigen Sitz achten!).




4 Aerosolabsaugung mit Kopfhörer verbinden

- 4.1 Positionieren Sie die Absaugkanüle zwischen Nase und Mundwinkel.
- 4.2 Verbinden Sie den Kopfhörer mit Kanülenadapter und Absaugschlauch. Dazu befinden sich auf dem Kopfhörer (linke und rechte Seite) und am Kanülenadapter magnetische Verschlüsse.



5 Absaugkanüle an Patientenmund ausrichten

- 5.1 Richten Sie die Absaugkanüle zwischen Nase und Mundwinkel aus.

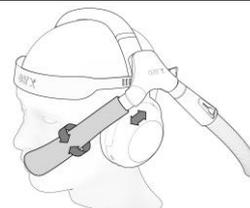

i Beachten Sie beim Aufsetzen des Kopfhörers, dass keine Haare oder Haut des Patienten eingeklemmt werden.

i Bei längerer Behandlungsdauer kann es zu Druckstellen durch den Kopfhörer kommen. Diese stellen keine Gefahr oder Behinderung für Patienten dar.

ACHTUNG

- ▶ Auf richtigen Sitz des Kopfhörers und des Kanülenadapters achten.
- ▶ Auf richtige Position der Absaugkanüle vor dem Patientenmund achten.
- ▶ Kopfhörer nicht auf dem Patienten ablegen.

i Diese Installationsanweisung gilt nur in Verbindung mit der Gebrauchsanweisung Aerosolabsaugung aer x (2.003.1812). Bitte beachten Sie die darin enthaltenen Hinweise zu Sicherheit, Installation und Betrieb des Gerätes.