

Installation und Erstinbetriebnahme

DE



1. Netzkabel an Gerät und Steckdose anschließen.
2. Druckluftschlauch auf Kupplung aufstecken.



3. Manometer überprüfen. Der eingestellte Druck muss zwischen 4,5 und 4,3 bar liegen.
4. Netzschalter einschalten.



5. Im Display erscheint:
Warning
Refill Dental Oil
Refill Cleaner
Diese Meldung mit der Menü-Taste bestätigen.
6. Mit den Pfeiltasten die Sprache auswählen und Datum und Uhrzeit einstellen.



7. Obere Abdeckung abnehmen.
8. Medienbehälter max. bis zur Markierung mit Flüssigkeiten befüllen. (Orange = Öl, Blau = Reiniger)
Beim Überschreiten der Minimum-Marke ertönt, etwas zeitverzögert (kann bis zu 90 Sek. dauern), je ein Signalton für Reiniger und Öl. Zwei Signaltöne pro Flüssigkeit bedeuten, dass der jeweilige Behälter bis zum Maximum gefüllt ist.
9. Abdeckung schließen.
10. Gerät am Netzschalter aus- und wieder einschalten.



11. Im Display erscheint: **Mediensystem füllen.**
Der Vorgang startet automatisch und dauert ca. 3 Min.
12. Montieren Sie die gewünschten Turbinen-Adapter.
Bitte beachten Sie, dass nur weiße SMARTcare Adapter verwendet werden dürfen!
13. Überprüfen Sie anschließend den festen Sitz aller Adapter und kontrollieren Sie die Durchflussmenge mit dem jeweils passenden Prüfadapter.
Bitte beachten Sie, dass nur SMARTcare Prüfadapter verwendet werden dürfen!

Jetzt ist Ihr SMARTcare einsatzbereit.



Diese Installationsanweisung gilt nur in Verbindung mit der Gebrauchsanweisung SMARTcare (2.002.7230). Bitte beachten Sie die darin enthaltenen Hinweise zu Sicherheit, Installation und Betrieb des Gerätes!